




Pred uporabo postavite kompas eFOLDi na odprto mesto, stran od hišnih ljubljencev in majhnih otrok. Razložitev je preprosta in ga lahko namestite v nekaj sekundah. Priporočamo, da pred prvim izletom vadite.



KAKO RAZVIJATI

KORAK 1 – SESTAVLJANJE VOLANSKEGA DROGA

Pred začetkom dela odstranite vso embalažo.

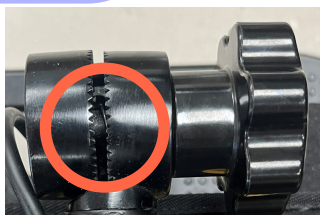

Prepričajte se, da je zobnik zrahljan (v nasprotni smeri urinega kazalca) in da je med zobmi na tečaju vrzel.



Sprostite volanski drog iz plastične sponke in ga dvignite v pokončni položaj.



Volanski drog pritrdite tako, da zavrtite zobnik (v smeri urinega kazalca). Volanski drog lahko namestite tako, da ustreza vašemu dosegu in udobju.

KORAK 2 – DVIG SEDEŽA



Naslonjalo sedeža dvignite v pokončni položaj. Naslonjalo bo „kliknilo“ na svoje mesto.



NAMESTITEV (NEOBVEZNO) NASLONOV ZA ROKE



Naslonjala za roke vstavite na svoje mesto, jih poravnajte in zategnite z velikimi vrtljivimi gumbi, ki jih je enostavno prijeti.

KONČNI VARNOSTNI PREGLEDI



Prepričajte se, da je volanski drog dobro pritrjen, če ni – zategnite zobnik.

Preverite, ali je rdeča ročica magnetne zavore v položaju LOCKED (nazaj), da se motor zaskoči.



Če želite vklopiti skuter, pritisnite sivi gumb pod zaslonom baterije. Izberite (D) za vožnjo ali (R) za vzvratno vožnjo, nato pa pritisnite gumb za plin, da se peljete. Ne pozabite ponovno napolniti baterije, ko se na zaslonu prikaže oranžna barva.



Če želite polniti, priključite napajalni kabel na polnilno vtičnico, ki se nahaja na vrhu volanskega droga.



Če želite odstraniti baterijo, dvignite zapah in ga previdno potegnite navzgor.

Polnilna vrata se nahajajo na strani baterije.

KORAK 1 – PREPOGIBANJE HRBTNEGA NASLONA



Vozilo Compass se vedno zloži na enak način, ne glede na to, ali je opremljeno z nasloni za roke ali brez njih.

Potegnite rumeno stikalo, da sprostite sedež.

Naslonjalo sedeža zložite ravno na osnovo sedeža, tako da poteka in leži pod zobnikom volanskega droga.

KORAK 2 – ZRUŠITEV VOLANSKEGA STEBRIČKA



Volanski drog sprostite tako, da zavrtite zobnik (v nasprotni smeri urinega kazalca).

Volanski drog položite ravno na naslonjalo sedeža in ga pritrdite v plastično sponko.