



Inden brug skal du placere eFOLDi Cliq på et åbent område, væk fra kæledyr og små børn. Den er nem at folde ud, og du kan sætte den op på få sekunder. Vi anbefaler, at du øver dig, inden du tager den med ud for første gang.



KLIK SAMMEN

TRIN 1 – MONTER RATTSTANGEN

Fjern al emballage, inden du går i gang.



Monter styret på løbehjulet: Skru tandhjulet af og tag det af, sæt styret på tapen, og sæt tandhjulet på plads igen uden at stramme det – der skal være en lille mellemrum mellem tænderne..



Løft ratstammen op i lodret position.



Fastgør ratstammen ved at dreje tandhjulet (med uret). Du kan indstille ratstammen, så den passer til din rækkevidde og giver dig den bedste komfort

TRIN 2 – MONTER SCOOTEREN



Sæt scooterens hoveddel sammen med bagdelen.



Sæt kroge over metalstangen, og tryk dem ned, indtil de klikker på plads



Sørg for, at kroge er fastgjort.

TRIN 3 – MONTER DE SIDSTE DELE OG TILBEHØR



Sæt sadelpinden i



Fastgør stolen til scooteren



Sæt batteriet i



Fastgør kurven til styrepinden

KOM GODT I GANG



For at starte scooteren skal du dreje nøglen med uret.
Indstil hastighedsregulatoren til en hastighed, du er komfortabel med.

BRUGSANVISNING



For at oplade skal du tilslutte strømkablet til opladningsporten, der sidder øverst på ratstammen.



For at fjerne batteriet skal du løfte låsen og forsigtigt trække det opad.
Opladningsporten sidder på siden af batteriet.

SKIL AD

TRIN 1 – AFMONTER DELE OG TILBEHØR



Tag kurven ud



Fjern sædet



Tag batteriet ud

TRIN 2 – ADSKILLELSE AF LØBECYKLEN



Løft det grå håndtag for at adskille den bageste del



Drej rorhåndtaget for at sænke roret, indtil det ligger fladt



Bemærk venligst, at denne folder udelukkende er tænkt som en kort vejledning. Du kan finde den fulde brugsanvisning i vores produktmanual. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 0800 915 0800 eller sende en e-mail til services@efoldi.com