



Stellen Sie den eFOLDi Cliq vor dem Gebrauch an einem freien Ort auf, fern von Haustieren und kleinen Kindern. Das Aufklappen ist ganz einfach, und Sie können ihn in Sekundenschnelle aufbauen. Wir empfehlen, dies vor Ihrem ersten Ausflug zu üben.



ZUSAMMENKlicken

SCHRITT 1 – MONTAGE DER LENKSÄULE

Entfernen Sie vor Beginn die gesamte Verpackung.



Befestigen Sie die Lenkstange am Roller: Schrauben Sie das Zahnrad ab und nehmen Sie es ab, stecken Sie die Lenkstange auf den Bolzen und setzen Sie das Zahnrad wieder auf, ohne es festzuziehen – lassen Sie einen Spalt zwischen den Zähnen.



Bringen Sie die Lenksäule in die aufrechte Position



Sichern Sie die Lenksäule, indem Sie das Zahnrad drehen (im Uhrzeigersinn). Sie können die Lenksäule so einstellen, dass sie Ihrer Reichweite und Ihrem Komfort entspricht.

SCHRITT 2 – STEIG AUF DEN ROLLER



Richten Sie den Hauptteil des Rollers am hinteren Teil aus.



Hängen Sie die Haken über die Metallstange und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrasten.



Vergewissern Sie sich, dass die Haken fest sitzen.

SCHRITT 3 – LETZTE TEILE UND ZUBEHÖR ANBRINGEN



Setzen Sie die Sattelstütze ein



Befestige den Stuhl am Roller



Legen Sie die Batterie ein



Befestigen Sie den Korb an der Deichsel

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERSTE SCHRITTE



Um den Roller zu starten, drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn. Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf eine Geschwindigkeit ein, die für Sie angenehm ist.



Zum Aufladen schließen Sie das Netzkabel an den Ladeanschluss oben an der Lenksäule an.



Um den Akku zu entfernen, heben Sie die Verriegelung an und ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben. Der Ladeanschluss befindet sich an der Seite des Akkus.

ZERLEGEN

SCHRITT 1 – TEILE UND ZUBEHÖR ENTFERNEN



Den Korb herausnehmen



Den Sitz abnehmen



Entfernen Sie den Akku

SCHRITT 2 – DEN ROLLER ZERLEGEN



Heben Sie den grauen Griff an, um den hinteren Teil abzunehmen



Drehen Sie das Ruderrad, um das Ruder abzusenken, bis es flach aufliegt.

