



Prima dell'uso, posiziona l'eFOLDi Cliq in uno spazio aperto, lontano da animali domestici e bambini piccoli. Aprirlo è facile e puoi montarlo in pochi secondi. Ti consigliamo di fare un po' di pratica prima della tua prima uscita.



FASE 1 - MONTAGGIO DEL PIANTONE DELLO STERZO

[CLICCA QUI](#)

Rimuovere tutto l'imballaggio prima di iniziare.



Collegare il manubrio allo scooter: svitare e rimuovere la rotella dentata, inserire il manubrio sul perno, quindi rimettere a posto e fissare la rotella dentata senza serrarla – lasciare uno spazio tra i denti.



Portare il piantone dello sterzo in posizione verticale.



Fissare il piantone dello sterzo ruotando la rotella (in senso orario). È possibile regolare il piantone dello sterzo in base alla propria portata e al proprio comfort.

FASE 2 - MONTA LO SCOOTER



Allinea il corpo principale dello scooter con la parte posteriore.



Posiziona i ganci sulla barra metallica e premi verso il basso finché non scattano in posizione



Assicurati che i ganci siano ben fissati.

FASE 3 - AGGIUNGERE LE PARTI FINALI E GLI ACCESSORI



Inserire il reggisella



Fissare la sedia allo scooter



Inserire la batteria



Fissare il cestello al manubrio

PER INIZIARE



Per accendere lo scooter, gira la chiave in senso orario. Regola il regolatore di velocità su una velocità che ti risulti comoda.

COME FUNZIONA



Per ricaricare il dispositivo, collegare il cavo di alimentazione alla porta di ricarica situata nella parte superiore del piantone dello sterzo.



Per rimuovere la batteria, sollevare il fermo e tirarla delicatamente verso l'alto. La porta di ricarica si trova sul lato della batteria.

SMONTA

FASE 1 - RIMUOVERE LE PARTI E GLI ACCESSORI



Rimuovere il cestello



Rimuovere il sedile



Rimuovere la batteria

FASE 2 - SMONTAGGIO DELLO SCOOTER



Sollevare la maniglia grigia per separare la sezione posteriore



Ruotare la rotella del timone per abbassarlo finché non è completamente disteso

