



Innan du använder eFOLDi Cliq ska du placera den på en öppen yta, på avstånd från husdjur och små barn. Den är enkel att fälla ut och går att ställa upp på några sekunder. Vi rekommenderar att du övar dig innan du ger dig ut på din första tur.



KLICKA IHOP

STEG 1 – MONTERA RATTSTÅNGEN

Ta bort allt förpackningsmaterial innan du börjar.



Montera styrstången på scootern: skruva loss och ta bort kugghjulet, trä styrstången på tappen och sätt tillbaka kugghjulet utan att dra åt det – lämna ett mellanrum mellan tänderna.



Lyft rattstången till upprätt läge.



Lås rattstången genom att vrida ratten (medurs). Du kan justera rattstången så att den passar din räckvidd och ger dig bästa möjliga komfort

STEG 2 – MONTERA SKOTERN



Rikta in scooterens huvuddel mot den bakre delen.



Placera krokarna över metallstången och tryck nedåt tills de klickar på plats



Se till att krokarna sitter ordentligt fast.

STEG 3 – MONTERA SLUTDELAR OCH TILLBEHÖR



Sätt i sadelstolpen



Fäst stolen på skotern



Sätt i batteriet



Fäst korgen på redskapskäftet

ANVÄNDNINGSANVISNING

KOM IGÅNG



För att starta scootern vrider du nyckeln medurs. Ställ in hastighetsregulatorn på en hastighet som känns bekväm för dig.



För att ladda enheten ansluter du strömkabeln till laddningsporten som sitter längst upp på rattstängan.



För att ta ut batteriet lyfter du spärren och drar försiktigt uppåt. Laddningsuttaget sitter på batteriets sida.

TA ISÄR

STEG 1 – TA BORT DELAR OCH TILLBEHÖR



Ta bort korgen



Ta bort sätet



Ta ut batteriet

STEG 2 – DEMONTERA SPARKCYKELN



Lyft det grå handtaget för att ta loss den bakre delen



Vrid ratten för att fälla ner ratten tills den ligger plant



Observera att denna broschyr endast är avsedd som en kortfattad guide. För fullständiga anvisningar hänvisar vi till produktens användarhandbok. Om du har några frågor är du välkommen att ringa oss på 0800 915 0800 eller skicka e-post till services@efoldi.com